


ISTRUZIONI PER LA CORRETTA RACCOLTA DEL CAMPIONE SALIVARE
CON DISPOSITIVO LOLLISPONGE (Lecca lecca)

- 1 Cercare di richiamare all'interno della bocca maggior saliva possibile sempre lontano dai pasti, senza aver bevuto e fumato da almeno 30 minuti.
- 2 Prima di aprire il tappo della provetta verificare che corrisponda il nominativo sull'etichetta, disinfettarsi le mani, e dopo estrarre il tampone dalla provetta.

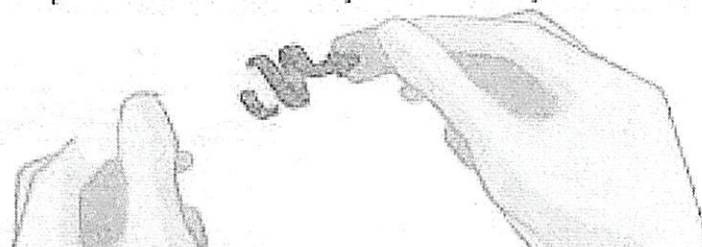

- 3 Tenendo il dispositivo dal tappo inserirlo all'interno della bocca, muoverlo delicatamente all'interno della bocca (parte superiore della lingua, fra i denti e guancia) per almeno 60 secondi in modo da inumidire bene la spugna.



- 4 Chiudere la provetta riavvitando il dispositivo e introdurla nella busta di trasporto, nella tasca dotata di chiusura a pressione.
- 5 Consegnare la busta al personale preposto.

